

## ZÁRUKA

Tato záruka se nevztahuje na závadu, která je důsledkem špatného zacházení, nedbalosti či běžného opotřebení výrobku. Záruka se také nevztahuje na součástky, které z povahy materiálu podléhají opotřebení a vyžadují pravidelnou výměnu, např. gumové součástky, úchyty, kolečka a jejich ukotvení a díly.

## Ochrana životního prostředí

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

## Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Pokud máte otázky ohledně Vašeho výrobku či záruky, kontaktujte prosím naše servisní oddělení.

Kontakt najdete na [www.tvproducts.cz](http://www.tvproducts.cz)

**Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.**

# CHODÍTKO PRO SENIORY NÁVOD K POUŽITÍ

CZ

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nákupem tohoto výrobku. Důkladně si přečtěte tyto pokyny k použití a uchovejte je pro další použití.

**Popis:**




1. Pojistka skládacího mechanismu.
2. Zajišťovací západky (vložené do odkládacích otvorů).
3. Odkládací otvory pro zajišťovací západky.
4. Zajišťovací otvory.

**VÁHOVÉ ZATÍŽENÍ: max 100 KG**

**Použití chodítka**


Chodítko je možno použít jako krokovací, kdy se obě strany pohybují nezávisle na sobě, což umožňuje pohybovat se bez nutnosti zvedání celého chodítka.

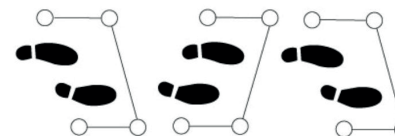

Pokud chcete použít chodítko jako krokovací, ponechte zajišťovací západky v odkládacích otvorech a pouze jej rozložte. Pokud chcete chodítko použít jako pevné, vložte obě zajišťovací západky do zajišťovacích otvorů. Před každým použitím se vždy ujistěte, že veškeré pojistné prvky jsou správně zabezpečeny. Pro složení chodítka nejprve odjistěte obě západky (vložte je do odkládacích otvorů) a stiskněte pojistku skládacího mechanismu. Nyní můžete chodítko složit do přepravní velikosti.


## Přesun z vozíku na chodítko

Ujistěte se, že chodítko je stabilní. Opřením rukou do madel vozíku si stoupněte a postupně a opatrně, jednu ruku po druhé, se přesuňte na chodítko.

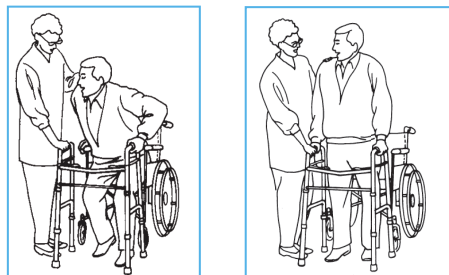

## Chůze s chodítkem

1. Umístěte střed svého chodidla mezi zadní nohy chodítka.
2. Zvedněte chodítko a pohodlně ho posuňte trochu dál od sebe. Ujistěte se, že je nyní pevně opřeno o zem.
3. Opatrně, krok za krokem, dojděte blíž k chodítku.

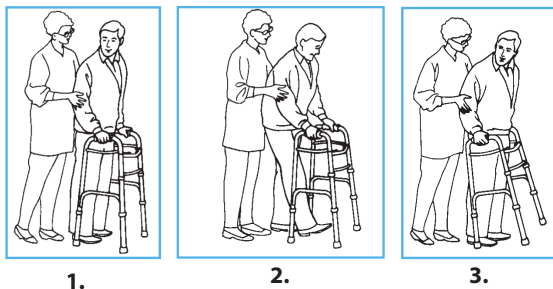


## Přesun z vozíku na chodítko - (pokud máte poraněnou pravou dolní končetinu)

Ujistěte se, že chodítko je stabilní. Opřením rukou do madel vozíku si stoupněte a postupně a opatrně nejprve přesuňte levou a pak pravou ruku na chodítko. (Pokud máte poraněnou levou nohu či chodidlo, přesuňte jako první pravou a poté levou ruku).

## Přesun z vozíku na chodítko - (pokud máte poraněnou pravou dolní končetinu)

Ujistěte se, že chodítko je stabilní. Opřením rukou do madel vozíku si stoupněte a postupně a opatrně nejprve přesuňte levou a pak pravou ruku na chodítko. (Pokud máte poraněnou levou nohu či chodidlo, přesuňte jako první pravou a poté levou ruku).

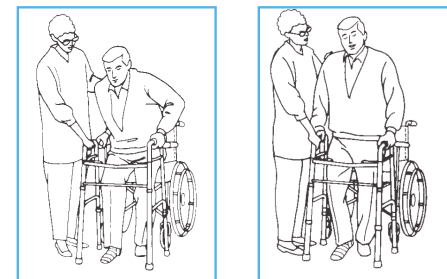

## Individuální nastavení chodítka

Při ruce natažené dolů by se madlo chodítka mělo nacházet ve výšce zápěstí. Pokud položíte ruku na madlo, měli byste mít loket ohnutý do úhlu zhruba 20° - 30°. Optimální výšku chodítka nastavte na jednu z osmi poloh. Všechny 4 nohy nastavte na shodnou pozici a zkontrolujte jejich zajištění (všechny západky musí zacvaknout).

## Upozornění:

Dávejte pozor na následující překážky:

1. Prodlužovací šňůry
2. Tekutiny na podlaze
3. Běhouny
4. Hračky či nepořádek
5. Nábytek
6. Dveře a prahy
7. Mezery v podlaze

Varování:

1. Netlačte dopředu jen jednu stranu chodítka, aniž byste ho předtím zvedli.
2. Používejte pouze originální příslušenství.
3. Použitím jiného příslušenství se vystavujete riziku pádu a zranění.
4. Chodítko nepoužívejte na schodech či eskalátorech.
5. Chodítko nepřetěžujte (váhové zatížení max. 100 kg).

