

SEDÁTKO DO VANY



Model KV01

návod k použití

Děkujeme, že jste si zakoupili toto sedátko do vany. Usnadňuje používání vany, jelikož při vstupu do vany nemusíte sedat až na její dno a při vylézání se nemusíte zvedat ze dna. Je vybaveno hygienickou sedací plochou, opěrnými úchytkami zabezpečenými proti skluzu a zaoblenými hranami.

Důležité pokyny

Je bezpodmínečně nutné uschovat tyto pokyny pro pozdější použití! Před prvním použitím zakoupeného zboží si pozorně přečtěte návod k použití, především bezpečnostní pokyny. Návod uschovejte pro pozdější upotřebení. Pokud předáte produkt třetí osobě, předejte společně s ním i návod k použití.

V předloženém návodu k použití se vyskytují následující symboly:

Předložený návod k použití je určen pro tento výrobek a obsahuje informace důležité pro jeho sestavení a manipulaci. Přečtěte si celý návod. Nerespektování pokynů uvedených v návodu může vést k vážným úrazům nebo poškození výrobku.



Tato výstražná upozornění je nutné dodržovat, aby nedošlo k případnému zranění uživatele.



Tento pokyn je nutné dodržovat, aby nedošlo k případnému poškození výrobku.



Tyto pokyny vám poskytnou užitečné dodatečné informace týkající se instalace nebo použití.



Důležité

- Pokud tento výrobek předáte dále, nebo jej poskytnete k užívání jiné osobě, ujistěte se, že dotyčná osoba zná obsah tohoto návodu k použití a předejte jej společně s výrobkem.
- Maximální zatížení sedátka do vany činí 100 kg! Tento výrobek nesmí používat více osob současně.
- Toto sedátko se smí používat pouze v běžně dostupných vanách, jejichž vnitřní rozměry se pohybují mezi 470 až max 660 mm!
- Používejte sedátko v souladu s účelem jejího použití a respektujte přitom tento návod.
- Neprovádějte žádné změny konstrukce a nepoužívejte výrobek společně s jinými kusy nábytku nebo jinými částmi zařízení.
- Nepřipevňujte žádné dodatečné části.
- Tento výrobek je zkonstruován pouze pro soukromé používání v domácnosti. Není vhodný pro jakýkoli způsob komerčního použití (např. v nemocnicích, domovech důchodců atd.)
- Před použitím zkontrolujte, zda není výrobek poškozen, a proveďte kontrolu správného upevnění sešroubovaných částí. V případě pochybností výrobek nepoužívejte, hrozí nebezpečný úrazu.
- Svévolně neprovádějte žádné opravy, v takovém případě by zanikl nárok na uplatnění záruky.
- Za účelem provedení opravy kontaktujte autorizované servisní pracoviště.
- Je-li výrobek používán dětmi, nebo v blízkosti dětí či osob, jimž v užívání brání nějaké ome-

zení, pak by měla být v dosahu dozorující osoba (a popř. pomocná síla). Tento výrobek není hračka.

- Obalový materiál nenechávejte v blízkosti dětí. Hrozí nebezpeční udušení!
- Dbejte na to, aby okraje vaší vany poskytovaly bezpečnou a stabilní podkladovou plochu a před každým použitím zkontrolujte, zda všechny 4 opěrné úchytky bezpečně doléhají na okraj vany!

Obsah dodávky a obal

Nejdříve, prosím, zkontrolujte, zda je obsah dodávky kompletní a zda je dodané zboží bez závad. V případě pochybností výrobek nepoužívejte a kontaktujte servisní pracoviště.

Součástí dodávky jsou: vanové sedátko, návod k použití

Obaly jsou znovu použitelné, nebo je lze recyklovat. Nepoužívané obalové materiály řádně zlikvidujte. Pokud při rozbalování výrobku zjistíte závadu způsobenou při transportu, ihned kontaktujte svého prodejce.

Varování: Obalový materiál nenechávejte v blízkosti dětí. Hrozí nebezpeční udušení.


Montáž sedátka ve vaně

Obr.: Zasuňte tyče do trubek postranních opěrek sedáčky a nastavte potřebné rozpětí opěrek dle šíře vany, ve které budete používat. Správnost nastavení vyzkoušejte umístěním sedátka na vanu. Sedátko se nasazuje na okraj vany. Následně zkratíte nůžkami plastové zarážky na vhodnou délku odpovídající délce mezi okraji trubek postranních opěrek nasazených tyčí. Zarážky nasadíte na tyče mezi trubky tak, aby vyplnily volný prostor na tyčích a jejich okraje těsně přiléhaly k okrajům trubek. Plastové zarážky nezkracujte v případě, kdy je potřeba dosažení max. rozpětí.

zářez na tyčce nutno umístit
na střed sedátka

max. 660 mm

min. 470 mm

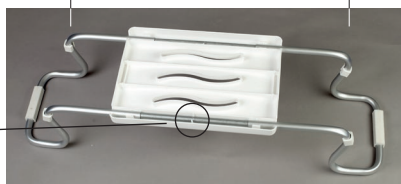

Varování

Toto sedátko se smí používat pouze v běžně dostupných vanách, jejichž vnitřní rozměry se pohybují mezi 470 až 660 mm! Dbejte na to, aby okraje vaší vany poskytovaly bezpečnou a stabilní podkladovou plochu a před každým použitím zkontrolujte, zda všechny opěrné úchytky bezpečně doléhají na okraj vany! Před použitím zkontrolujte, zda není výrobek poškozen a proveďte kontrolu správného upevnění všech částí. V případě pochybností výrobek nepoužívejte, hrozí nebezpečí úrazu!

Údržba

Pozor. K čištění madla nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, nečistoty a prach odstraňujte měkkým popř. lehce navlhčeným hadříkem. V případě výskytu silného znečištění použijte běžný neutrální čisticí prostředek.

Po očištění vlhkým hadříkem a po každém použití madlo důkladně osušte. V případě výskytu infekcí by mělo být madlo ošetřeno běžně dostupným desinfekčním prostředkem a obsahem alkoholu. V případě viditelných závad nesmíte výrobek používat, dokud nebude odborně

opraven popř. vyměněn.

Technické údaje

Rozměry (š × v × d): 260 × 200 × 650-840 mm

Hmotnost cca: 1,65 kg

Velikost sedací plochy (š × d): 260 × 360 mm

Maximální nosnost: 100 kg

Ochrana životního prostředí

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odezdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.

Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.