

# Prodloužená seniorská ruka

## návod k používání



Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití. Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod a uchovejte ho pro pozdější nahlédnutí.

### Specifikace výrobku:

- lehký trvanlivý materiál
- měkké koncovky pro úchop
- ergonomicky tvarovaná rukojeť
- po složení velmi skladná
- možnost fixace úchopu

### POUŽITÍ:

Vhodné pro použití doma i v kanceláři. Mechanická ruka prodlouží Váš úchop o 80 cm. Gumové koncovky zajišťují šetrný a bezpečný úchop. Ergonomicky tvarovaná rukojeť s možností fixace úchopu. Pouhým stiskem prstu uchopíte zvolený předmět. Fixaci úchopu provedete posunutím pojistky na boku rukojeti, směrem dopředu! Pro uvolnění úchopu je nutné pojistku posunout zpět dozadu a následně stisknout páčku pro úchop.

### ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ:

Styk s organickými rozpouštědly a agresivními čistícími prostředky může výrobek poškodit. Po použití výrobek pouze otřete vlhkým hadříkem a poté otřete do sucha. Skladujte na suchém místě.

### Ochrana životního prostředí

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

### Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.