




OSOBNÍ ZESILOVAČ ZVUKU KLASIK

Návod k použití pro model: JH-113

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.

Popis přístroje

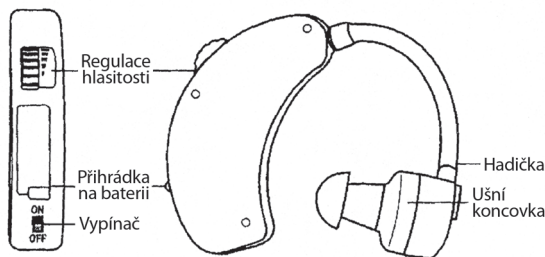

Užití zesilovače zvuku

- Nastavte hlasitost na nejnižší úroveň.
- Zkontrolujte, zda je správně vložena baterie.
- Nasadte si zesilovač na pravé či levé ucho.

POZOR

Vyberte ze 3 dodávaných hygienických koncovek takovou, která nejlépe vyhovuje vašemu uchu tak, aby ucho úplně utěsnila. Pokud zvukovod neutěsní, může docházet k interferenci zvuků, která způsobí pískání přístroje.

Vypínač přepněte do polohy ON=zapnuto.
Hlasitost nastavte na požadovanou úroveň.

Upozornění

Zesilovač nezakrývejte (rukou apod.), mohlo by dojít k hlasitému pískání přístroje.

Vypínač ON/OFF

ON

Vypínač má dvě polohy:

ON=zapnuto

OFF=vypnuto.

Zesilovač vždy vypněte (poloha OFF), pokud jej právě nepoužíváte.


Zvýšíte tak životnost baterií.

OFF


Regulace hlasitosti

Přístroj má plynulou regulaci hlasitosti.

Hlasitost regulujte pomocí otočného knoflíku.

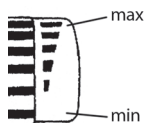

Výměna baterií

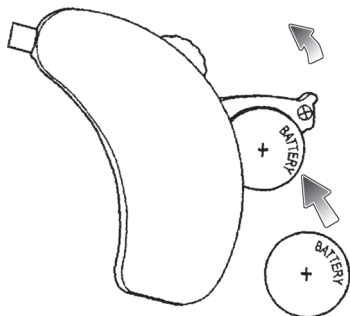

Otevřete přihrádku pro baterii a vložte baterii (dle vyobrazení). Použijete knoflíkové baterie typu 1,5V velikosti LR-44. Dbejte na správné vložení baterií (dle vyobrazení).

Správné nasazení zesilovače



Ušní koncovku nasadte řádně do zvukovodu.

Ujistěte se, že ušní koncovka zůstala nasazena na hadičce přístroje.

Upozornění

- Hlasitost zvyšujte velmi pozvolna, aby nedošlo k náhlému zvýšení hlasitosti okolních zvuků až k bolestivosti ucha.
- Tento výrobek NENÍ zdravotnickým prostředkem určeným ke kompenzaci nedoslýchavosti. O použití se poradte s odborným lékařem.
- Výrobek udržujte mimo dosah dětí a nespovědných osob.
- Baterie nelze opět dobít.
- Baterie nevhazujte do ohně.
- Baterie udržujte mimo dosah dětí.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie z přístroje.
- Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.
- Přístroj není vodotěsný a nesmí přijít do kontaktu s vodou.
- Pokud nedopatřením dojde k namočení, přístroj vypněte, vyjměte baterii a neche oschnout.

Technické údaje

Životnost baterie - do 24 hodin (LR-44 1 ks)

Operační proud - <8,4mA

Operační rozsah napětí - 1,0-1,6V

Hmotnost (včetně baterií) - 10g

Frekvenční rozsah - 220~5000 Hz+/-6dB

SSPL 90dB - 130dB

Harmonické zkreslení - <5,3%

Ochrana životního prostředí



Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.